

# EarWell®

## NEINVAZIVNÍ LÉČBA DEFORMIT UŠNÍCH BOLTCŮ EARWELL

- + **Bezbolestné a rychlé řešení.**
- + Ideální čas aplikace cca 3-7 dnů po narození.
- + Léčba je efektivní **při zahájení do 2 měsíců**, ideálně do 6 týdnů od narození, pokud chceme dosáhnout velmi dobrý výsledek.
- + **Délka léčby** závisí na stáří dítěte a typu deformity, **2-6 týdnů.**
- + Sada EarWell obsahuje tvarovací systém se 3 páry dlažek.
- + Dlažky se vyměňují každých 14 dní.
- + Při maximální délce trvání léčby jsou nutné 3-4 návštěvy u lékaře.

## JAK POSTUPOVAT PŘI INDIKACI K LÉČBĚ:

1. Předat rodiči brožuru EarWell nebo odkázat na stránky [www.earwell.cz](http://www.earwell.cz)  
Brožuru rodiče mohou také najít v poporodním balíčku Happy Baby.
2. Na stránkách EarWell je **kontaktní formulář**, kde rodiče vyplní veškeré relevantní informace a přiloží fotografii uší dítěte.
3. EarWell obratem kontaktuje rodiče s informacemi od konzultujícího lékaře - o jakou deformitu se jedná, zda je možná léčba, kolik stojí a kdo je nejbližší aplikující lékař.
4. Po potvrzení zájmu o léčbu rodičem, EarWell kontaktuje příslušného lékaře a domlouvá termín návštěvy.
5. Následuje první aplikace u lékaře, další termíny výměn systému komunikuje rodič již přímo s ošetřujícím lékařem.
6. V průběhu léčby má možnost kontaktovat EarWell telefonicky nebo na WhatsApp. Reakce je promptní na čísle + 774 224 132.

## Nejčastější deformity ušních boltců



## ODSTÁTÉ BOLTCE - INDIKACE

- ▶ Odstáté boltce často nelze po narození poznat pouhým okem.
- ▶ Doporučujeme měřit **2.-3. den** po narození a dále s odstupem **jednoho týdne**, v případě že je výsledek hraniční nebo nejasný.
- ▶ Pokud se boltce nesrovná do **10 dní**, je vysoce pravděpodobné, že se odstátí bude dále zhoršovat (**to platí pro všechny typy deformit**).
- ▶ Pro úspěch léčby je nezbytné **začít co možná nejdříve**, jedná se o nejobtížnější tvarovatelnou deformitu. Ideálně několik dní po narození dítěte.
- ▶ K indikaci odstátých uší je možné využít měření - **projektometrem**.

## JAK MĚŘIT:

1. Najděte kost za uchem (mastoid), malou vyvýšeninu těsně za uchem, kde se ucho pojí s hlavou.
2. Přiložte měřítko kolmo k hlavě směrem k okraji ucha (viz obr.)
3. **Vnější okraj ucha** změřte u nejvíce odstávající části (většinou střední nebo horní část).
4. Pokud je okraj ucha v červené zóně nebo je tato vzdálenost větší než **8 mm**, **doporučujeme zahájit léčbu**.

## JAK MĚŘENÍ INTERPRETOVAT:

- ▶ Jedná se o prediktivní měření, které vychází ze skutečnosti, že se projekce ucha do dospělosti ztrojnásobí.
- ▶ **21+ mm** v dospělosti je hranice, která se definuje jako odstátý boltce.
- ▶ Pokud je vnější okraj boltce v červené zóně (jak je vidět na obrázku), je již odstátí větší než 7 mm.



Ear Well®

www.earwell.cz

LÉČBA

POZOR

BEZPEČNÁ ZÓNA

